

P-Cem Tuben®

Инструкция по применению

Описание

P-Cem является легким в приготовлении цементом для временной фиксации, не содержащим эвгенола. Не влияет на процесс отвердевания пломбировочных материалов и материалов для фиксации на основе смол. Рекомендуется применять P-Cem при случаях аллергии к эвгенолу. Для поддержания жизнеспособности зубов P-Cem содержит гидроксид кальция и гидроксиапатит.

Показания к применению

P-Cem применяется в качестве временного цемента для фиксации и пломбирования.

Способ применения

P-Cem использовать при комнатной температуре. В случае пониженной температуры (использование охлажденной поверхности для замешивания) увеличивается рабочее время. База и паста-катализатор смешиваются в пропорции 2:1. Для этого выдавить одну часть пасты катализатора и соответственно две части основы на блок для замешивания или стекло. Смешивать в течение приблизительно 30 секунд обе субстанции до тех пор, пока масса не станет однородной. Применять пластиковый шпатель. Нанести тонким слоем на внутреннюю поверхность временной коронки или моста, и установить на подготовленный зуб. Не устанавливайте на сухую поверхность, увлажните ее предварительно водой. С P-Cem можно работать в течение приблизительно 1-2 минут, затвердевание во рту происходит за 3-6 минут. После того, как через 3-5 минут P-Cem затвердеет, удалить излишки.

Дополнительные свойства

Для того чтобы сделать материал более пластичным и увеличить время работы с P-Cem, необходимо

добавить немного больше базы P-Cem или небольшое количество вазелина. Кроме того, влажная среда (увлажненные поверхности) дополнительно облегчает последующее снятие коронок. Чтобы получить более твердый и быстрее застывающий материал, необходимо добавить больше пасты катализатора (временное пломбирование) или оксид цинка. При обширных и многоповерхностных полостях, а также в случае долгосрочных временных пломб (максимально 1 месяц) необходимо применять более твердый цемент. Остатки P-Cem можно легко удалить, смочив их холодной водой.

Побочное действие

При точном выполнении положений инструкции не ожидается возникновений нежелательных побочных реакций.

Выполнение инструкции

Выполнять все советы по работе и мерам предосторожности. В случае появления побочных действий или других реакций (даже при точном выполнении требований инструкции), просим по возможности информировать нас с подробным описанием всех сопутствующих обстоятельств и симптомов.

Условия хранения

Хранить P-Cem при комнатной температуре. Плотно закрывать тубы после пользования. Не переставлять крышечки на тубах

Информация для заказа

[REF] WP4010 База + катализатор 2x25g