

Competence universal®

Инструкция по применению

Competence universal - светоотверждаемый, рентгеноконтрастный универсальный композит для реставрации полостей всех классов. Его специальные моделировочные свойства делают его особенно подходящим для многослойной техники. Это не только гарантирует естественное и высокоэстетическое пломбирование, но и минимизирует усадку.

В случае попадания в глаза - немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Если у вас возникли нежелательные эффекты, даже в случае сомнения, мы просим уведомить в каждом отдельном случае, описывая отсутствующие обстоятельства и симптомы как можно детальнее.

<p>Назначение Реставрация полостей всех классов</p> <p>Рекомендации по использованию 1. До применения очистите зуб, удалить все остатки с помощью воды. Определите цвет зуба по шкале Vita®. По возможности используйте раббердам. 2. Подготовьте полость в соответствии с правилами адгезивной технологии. Закруглите края эмали и защитите области пульпы. 3. Травите по мере необходимости, с вашим предпочтительным способом, например способом тотального протравливания. 4. Нанесите праймер-бонд (например C-Bond) с помощью матрицы. 5. Сделайте прокладку из тонкого слоя жидкого композита (Competence Flow) или компомера по мере необходимости. Мы рекомендуем использовать матрицу. 6. Заполните полость требуемым оттенком слоями максимальной толщиной 2 мм. Полимеризуйте каждый слой в течение 20 секунд. 7. Удаление излишков, контурное и финишное формирование осуществляются, например, алмазным финишером и гибкими дисками уменьшающейся зернистости. Зеркальная полировка может осуществляться с полировальной пастой (например, Vision Paste) при помощи полировочных чашек/дисков.</p> <p>Внимание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полимеризационные устройства должны испускать свет длиной волны 450 нм и регулярно проверяться. Световод должен быть помещен как можно ближе к пломбировочному материалу. • Не снимайте обедненный кислородом слой, так как он понадобится для связи с другим слоем. • Соблюдайте инструкциям по применению других материалы, которые вы используете вместе с Competence universal. <p>Взаимодействия Избегайте материалов, содержащие эвгенол, влагу и масло - они могут препятствовать полимеризации. Использование катионные жидкостей для полоскания рта, препаратов для удаления налета или хлоргексидина может вызвать обесцвечивание.</p> <p>Противопоказания Применение Competence universal противопоказано в случае невозможности использовать дренаж или рекомендуемую технику применения. Не наносите непосредственно на открытую пульпу и при наличии аллергических реакций на компоненты препарата.</p> <p>Побочные эффекты Никаких побочных эффектов не известно на сегодняшний день. Повышенная чувствительность к компонентам не может быть исключена в каждом конкретном случае. Избегайте контакта кожи с пастой. В случае контакта -- немедленно промойте водой с</p>	<p>Указания по применению Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнений - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.</p> <p>Состав Стоматологическое стекло в основе БИС- GMA матрицы стоматологические смолы (олигомеры метакрилаты), пигменты, добавки, катализатор .</p> <p>Фактор заполнения : 76 % мас = 57 % по объему (0,02 - 1,5 мкм).</p> <p>Соблюдайте инструкции по применению используемых материалов .</p> <p>Классификация Competence universal соответствует требованиям стандарта DIN EN ISO 4049.</p> <p>Хранение Хранить при температуре не выше 25 ° C. Разрывать шприцы сразу после использования для предотвращения отверждения от окружающего света. Не использовать после дата истечения срока годности.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ Инструменты для нанесения (наконечники, кисточки) предназначены только для одноразового использования.</p> <p>Форма выпуска</p> <p>REF WP4250: Competence universal, набор из 4 шприцов 4,5 г разных оттенков Vita® (A2, A3, A3.5, B2), 10 мл C-Bond, 2 мл Extra-Gel 2 мл Glass-Liner + аксессуары</p> <p>REF WP4251: Competence universal, набор из 4 шприцов 4,5 г разных оттенков Vita® (A2, A3, A3.5, C2), 10 мл C-Bond, 2 мл Extra-Gel 2 мл Glass-Liner + аксессуары</p> <p>REF WP4252: Competence universal, рефилл, A-1, 4,5 г</p> <p>REF WP4253: Competence universal, рефилл, A-2, 4,5 г</p> <p>REF WP4254: Competence universal, рефилл, A-3, 4,5 г</p> <p>REF WP4255: Competence universal, рефилл, A-3.5, 4,5 г</p> <p>REF WP4294: Competence universal, рефилл, B-1, 4,5 г</p> <p>REF WP4256: Competence universal, рефилл, B-2, 4,5 г</p> <p>REF WP4264: Competence universal, рефилл, B-3, 4,5 г</p> <p>REF WP4257: Competence universal, рефилл, C-2, 4,5 г</p> <p>REF WP4266: Competence universal, рефилл, C-3, 4,5 г</p> <p>REF WP4265: Competence universal, рефилл, D-2, 4,5 г</p> <p>REF WP4258: Competence universal, рефилл, D-3, 4,5 г</p> <p>REF WP4260: Competence universal, рефилл, A-2 opaker, 4,5 г</p> <p>REF WP4259: Competence universal, рефилл, A-3 opaker, 4,5 г</p> <p>REF WP4261: Competence universal, рефилл, Incisal 4,5 г</p> <p>REF WP4267: Competence universal, рефилл, B-2 opaker, 4,5 г</p>
--	---